



PRIMER PASO

El pene se encuentra en posición de reposo.

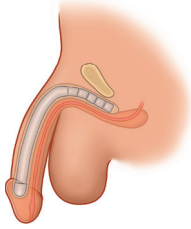


SEGUNDO PASO

Con una mano, estire el pene hasta la posición deseada.

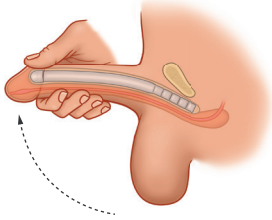


TERCER PASO

El pene se encuentra en posición erecta.

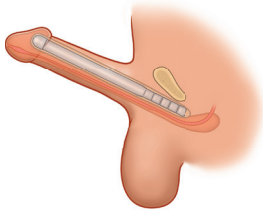

CUARTO PASO

Con una mano, devuelva el pene a su posición de reposo.

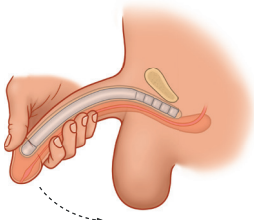

**TRATAMIENTO DE
DISFUNCIÓN ERÉCTIL**
INFORMACIÓN PARA PACIENTES

ZSI 100
Implante de Pene Maleable
Su compañero de confianza



WWW.ZSIMPLANTS.CH

Zephyr Surgical Implants
ISO 13485
Implants CE



V10




SWISS TECH

INTRODUCCIÓN

El Implante Peneano Maleable ZSI 100 ha sido desarrollado para ser una solución sencilla a la disfunción eréctil masculina. El implante consta de dos cilindros maleables que se insertan en los cuerpos cavernosos del pene.

La erección del pene se consigue mediante la fácil manipulación de los dos cilindros.

El implante de pene ZSI 100 no afecta a la sensibilidad del glande.

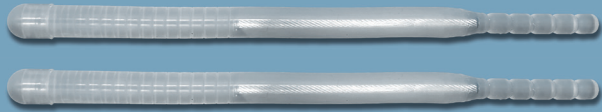


Implante de pene maleable ZSI 100

ANATOMÍA

El pene masculino se compone de tres partes: el glande, el cuerpo cavernoso y la uretra.

El glande es la zona más sensible del pene. El cuerpo cavernoso es donde fluye la sangre hacia el interior del pene, provocando la erección. La uretra, envuelta por el cuerpo esponjoso, forma parte del tracto urinario.

Los cuerpos cavernosos están formados por dos cavidades cilíndricas situadas una al lado de la otra por encima de la uretra. Tienen la capacidad de inflarse y luego desinflarse, permitiendo que el pene se ponga erecto y luego flácido. La disfunción eréctil se produce cuando los cuerpos cavernosos ya no son capaces de inflarse.

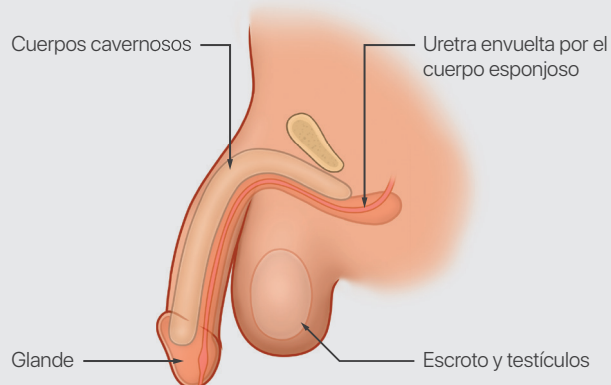


IMPLANTE DE PENE MALEABLE ZSI 100

El Implante Peneano Maleable ZSI 100 es un dispositivo utilizado para tratar quirúrgicamente la disfunción eréctil en el hombre. El Implante Peneano Maleable ZSI 100 está formado por dos cilindros firmes pero maleables que pueden manipularse fácilmente. Como el implante se inserta en el pene, es una solución eficaz y discreta para la disfunción eréctil.

Los cilindros del Implante Peneano Maleable ZSI 100 se insertan en cada cuerpo cavernoso, a ambos lados del pene. No se extrae ni se crea tejido para insertar los cilindros. Se colocan dentro de un espacio existente del pene, donde la sangre fluía y provocaba la erección del pene.

El implante de pene ZSI 100 no afecta a la capacidad del paciente para orinar o eyacular. El implante no afecta a la sensibilidad natural del pene ni del glande.

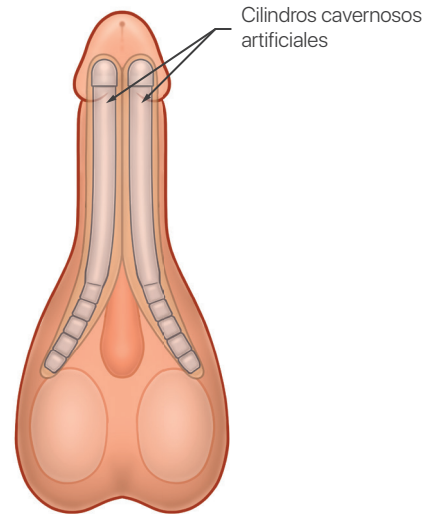


FUNCIONAMIENTO DEL IMPLANTE DE PENE ZSI 100


La maleabilidad del Implante de Pene ZSI 100 facilita su uso. Cuando se desea una erección, se puede enderezar hacia arriba en cuestión de segundos, listo para la actividad sexual. El implante de pene maleable ZSI 100 puede mantenerse erecto tanto tiempo como desee el paciente.

El paciente puede seguir manteniendo relaciones sexuales incluso después de experimentar un orgasmo, si así lo desea. Cuando estén satisfechos, el Implante de Pene ZSI 100 puede volver a colocarse en posición flácida.

PENE EN POSICIÓN ERECTA

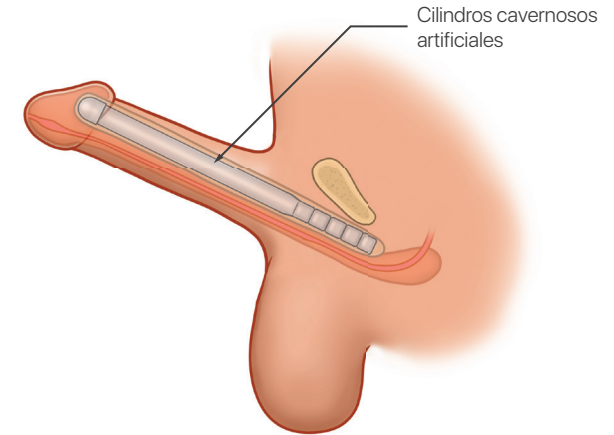

PENE EN POSICIÓN DE REPOSO

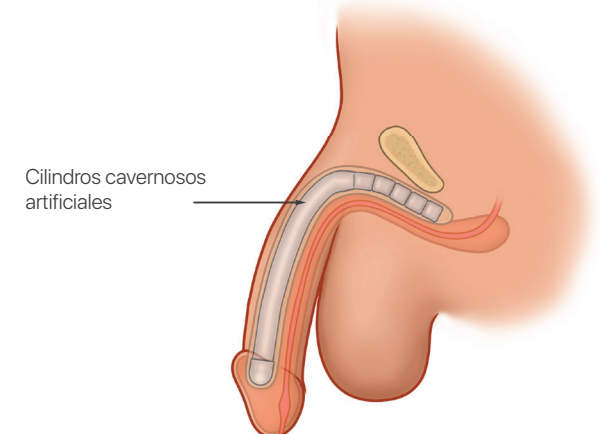

Para más información:
YouTube
ZSI: Incontinence - Erectile Dysfunction